

■ Upínací pásy do invalidních vozíků

Provedení:

z prateľného materiálu, hypoalergenní materiály, výplň z měkké pěny, kontaktní vrstva polyester umožňující odvod potu, zapínání na přezky.

Praní:

- **Nepoužívat bělicí prostředky; nepoužívat změkčovací prostředky!**

Prací program do 30°C, používat neutrální prací prostředky;

Sušení:

- **Nepoužívat sušičky!** Sušit na rovném povrchu bez přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla!

Důležitá upozornění:



- nepoužívat bělidla ani dezinfekční prostředky na bázi chlóru!!!
- výrobek nelze bělit!
- výrobek nelze čistit chemicky!
- výrobek se nesmí žehlit!
- pomůcky nezanedbávejte blízko nechráněných plamenů a přímých zdrojů tepla
- vždy zkontrolujte utažení pásu; zvláště při použití břišních pásů VTLA11, VTLA20 hrozí při sklouznutí osoby pod pás její udušení!

Nastavení velikosti:

Nastavení a správné umístění upínacího pásu je nezbytné pro bezpečnost osoby na vozíku a také chrání produkt před zničením. Přílišné utažení popruhů může vést např. k poruchám krevního oběhu, naopak volné popruhy mohou zapříčinit pád či zhroucení osoby na vozíku. První se spíná spodní pás pro oblast trupu a pánve sponou vzadu. Jako druhý se spíná pás pro oblast trupu a nakonec se sepnou dva ramenní pásy sponami vzadu. Podle tělesných dispozic uživatele je nutné vybrat správný typ upínacího pásu.



Dovozce:

APOS BRNO s.r.o., Kotlanova 3, 628 00 Brno,
tel./fax: 541 217 516, www.aposbrno.cz, e-mail: info@aposbrno.cz