



Overall

Údržba: 4080 4082 4510 4520 4671 4681 4 682 4686 4688 4701 4702 4706 4708 4709 4710 4713



4703 4704 4715 4716 4717



4705






Materiál: viz etiketa

Použití: • výrobek slouží jako spodní oblečení pro osoby se zvláštní péčí

Návod na zapnutí pojistky proti samovolnému rozeptnutí zipu

1. protáhněte šňůrku táhlem zipu
2. zauzlujte konce šňůrky do smyčky
3. zapněte perforovanou gumu na první knoflík
4. provlékněte perforovanou gumičku smyčkou
5. zapněte perforovanou gumu druhým knoflíkem

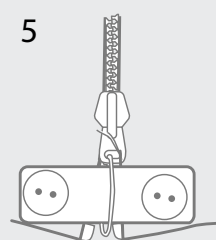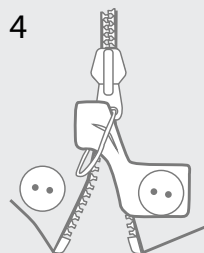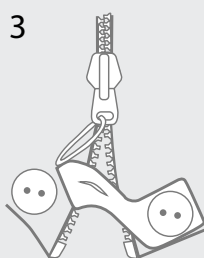

Upozornění:

VÝROBEK JE TŘEBA PRÁT S PLNĚ UZAVŘENÝM ZIPEM, ABY NEDOŠLO K UVÍZNUTÍ JEZDCE V BUBNU PRAČKY A TÍM K JEHO VYTRŽENÍ!