

## Monitorování pohybu (lůžko/místnost)




### (stručný návod, radiový přenos)

Monitorování pohybu, opuštění lůžka nebo opuštění místnosti využívá dveřní snímač (P161) a snímač pohybu(P162). Informace je radiově přenesena na pager (P137).

Tato příručka je rychlým průvodce pro instalaci, test a použití systému.

V případě, že budete potřebovat modifikovat nějaké nastavení či parametry je k dispozici uživatelská příručka.

#### Proces monitorování:

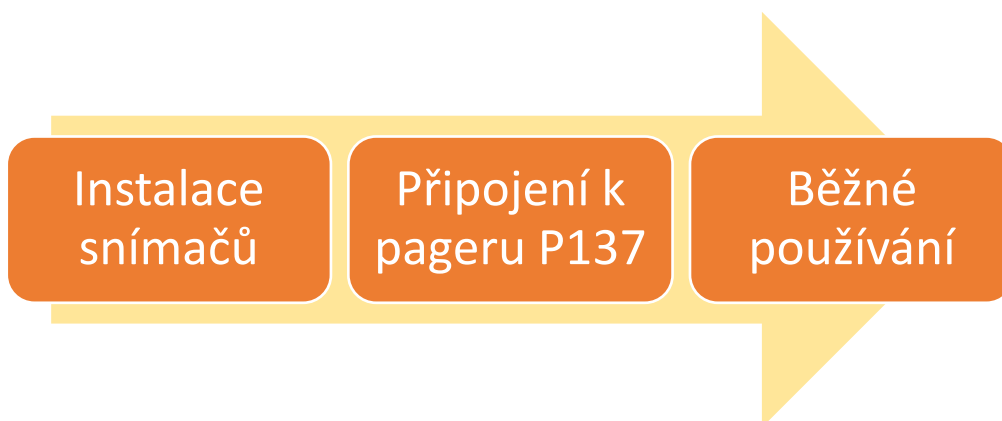

#### Snimače a jejich instalace:

##### P162B Snímač pohybu

Snímač pohybu může být umístěn na zdi s dodaným držákem nebo umístěn na podlaze ve vhodném (diskrétním) umístění pro spuštění alarmu/výstrahy opuštění postele. (vhodné je umístit asi 2 m od boku postele).

/ V případech speciálního napojení vyžádejte spojovací kabel/

#### P 162B základní fakta

Rozměry	160 x 70 x 40 mm
Hmotnost	220 g
Baterie	4xAA
Materiál	ABS
Životnost baterií	Více jak 1 rok v režimu zapnuto. 1 měsíc stálého použití – zapnuto+alarmové hlášení a reset



## P161B Dveřní snímač

je namontován na dveřích pomocí přiložených lepicích podložek nebo šroubů.

bílý magnet (rámeček) je připevněn k rámu dveří a musí být umístěn v blízkosti oblasti označené SENSE, když jsou dveře zavřené. ( je přijatelná vzdálenost 10-15 mm, což umožňuje snadnou instalaci)




Ujistěte se, že je použita správná jednotka pro dveře (PŘEDNÍ nebo ZADNÍ), protože tyto výrazy používá pager (změna je však na požádání možná).

Horní část spínače je navržena tak, aby manipulace s ní nebyla nutná a zároveň dává jednoduchý přístup pro vypnutí snímače červeným klíčem (v případě potřeby).


### P 161B základní fakta

Rozměry	X?
Hmotnost	
Min. hmotnost uživatele	
Materiál	
Záruka	X?

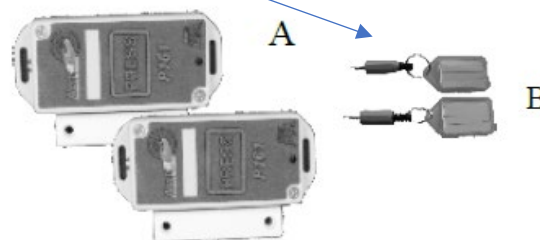

## Použití a spuštění systému s pagerem P137

### Zapnutí pageru

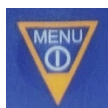

Podržte tlačítko MENU po dobu cca 3 sekund. Objeví se krátce adresa pageru a pak stupnice nabíjení baterie. Pokud nedojde k zapnutí pageru, je třeba nabít jeho baterii po dobu nejméně 5 minut.

### Vypnutí pageru

Vstupte do nabídky podržením tlačítka MENU po dobu cca 3 sekund. Zmáčknete šipku vpravo 2x a po objevení funkce „Vypnout“ šipkou nahoru vypnete pager.

### Zapnutí dveřního snímače (P161).

Stisknutím spínače HELP zapnete dveřní spínač P161. Držte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se světlo nerozsvítí a poté nezhasne. Mělo blikat slovo Front/PŘEDNÍ nebo Back/Zadní

Pokud se baterie vybité, bude odeslána na pager chybová zpráva

### Zapnutí snímače pohybu (P162).

Pokud rozbalujete nové čidlo, odejměte zadní kryt a odstraňte izolační pásky u kontaktu baterií vytažením.

Pokud použijete pager, bude se na něm zobrazovat stav a baterií a jejich potřebná výměna.

Namiřte dálkový ovladač na čidlo a stiskněte tlačítko ARM až červená kontrolka na jednotce problikne. Pak zbývá 30 sekund na opuštění prostoru.

### Spojení s pagerem P137 /párování/

Vyšlete testovací signál přejetím magnetem (není součástí dodávky) po spodní hraně jednotky nebo tím, že aktivujete alarm.

(Starší model: Stiskněte horní tlačítko TEST po dobu 1 sekundy, na pageru se objeví slovo MOTION/ Pohyb.)

Test radiového spojení:

Opakujte toto stisknutí v okrajových oblastech budovy, a tak otestujete příjem radiového signálu.

## Běžné používání monitorovacího systému:

**Dveřní spínač P161** je spuštěn odstraněním červeného klíče (tímto také můžete snímač vypnout)

### Aktivizace čidla P162B

Namiřte dálkový ovladač na čidlo a stiskněte tlačítko ARM až červená kontrolka na jednotce proklikne. Pak zbývá 30 sekund na opuštění prostoru.

Režim alarmu

Při zaznamenání poplachu/alarmu se rozsvítí červená LED na čidle, poté i LED dioda Alarm na pageru a rozezní zvukový signál a pager začne vibrovat.

### Deaktivizace alarmu

Alarm vypněte namířením ovladače na jednotku a stisknutím tlačítka DISARM. Pokud byla jednotka aktivní, je vypnutí potvrzeno bliknutím červené kontrolky. Pokud jednotku deaktivujeme během 4 sekund po narušení hlídaného prostoru, není ještě spuštěný alarm. Jednotku opětovně aktivujte stiskem tlačítka ARM

Pager P137 /případně jiná jednotka/ je ve stavu pasivního očekávání signálu/alarmu, který je aktivován snímači.

Po obdržení signálu snímače/ů, pager zobrazí hlášení a začne blikat červené světlo LED Alarm, společně se zvukem. Zvuk může být ztlumen buď permanentně nebo na 5 minut. (zatím je možná návštěva uživatele a resetování). Pager může být nastaven také na vibrace.

Volání/alarm **ze dveřního snímače** je zrušen zavřením dveří

Volání/alarm z snímače pohybu může být zrušeno jen uživatele a stisknutím tlačítka RESET na dálkovém ovladači

Snímače/monitorovací jednotky mohou mít zapnutu funkci režimu **Safelink** (kompletní systém testování radiového spojení, který prostřednictvím opakovaných signálů, jenž může upozornit pečující o ztrátě nebo oslabení radiového signálu). O použití více v uživatelské příručce.



návštěvou

## Přehled stavů a hlášení na pageru P137

Situace	Důvod	Snímač	Zrušení volání /Alarmu	Zobrazení na pageru P137	Tón a světlo alarmu na pageru
Front/Přední	Aktivita předních dveří	Dveřní-Světelná kontrolka bliká 0,5s	Zavření dveří	NOUZE 01	Přerušovaný tón + světlo
Back/Zadní	Aktivita zadních dveří	Dveřní-Světelná kontrolka bliká 0,5s	Zavření dveří	NOUZE 01	Přerušovaný tón + světlo
Pohyb	Detekován pohyb v místnosti	Světelná kontrolka svítí	Dálkové ovládání čidla-zmáčknutí tlačítka	NOUZE 01	Přerušovaný tón + světlo
TEST	Přejetí magnetem ve spodní části čidla (starší model krátké zmáčknutí RESET	Světelná kontrolka 1x blikne		Číslo/Jméno jednotky a stav signálu a baterií snímače	Bez tónu
Slabá baterie na jednotce/snímači	-	Světelná kontrolka bliká krátce	Dobití nebo výměna baterií	Číslo/Jméno jednotky +VymenBat (Pozn.1)	Měnicí se 2tóny + světlo
Chyba/vybitá baterie na jednotce / snímači	-	Světelná kontrolka bliká krátce	Dobití nebo výměna baterií	Fault 31	

### Výměna baterií

#### Výměna baterií na snímači pohybu

Uvolněte šroub a vysuňte zadní kryt. Po výměně baterií je třeba opětovně spárovat jednotku s dálkovým ovladačem. Pokud je jednotka umístěna nad dveřmi, je třeba ji před demontáží krytu otočit o 180°. Životnost baterií jsou cca 3 měsíce.

#### Výměna baterií v dálkovém ovladači

Vysuňte krytku s tlačítky a vyměňte baterie.

#### Výměna baterií v dveřním snímači

Lze provést na místě po odstranění dvou předních šroubů a vytažením krytu zezadu uvolníte prostor. Baterie prosím vysuňte z držáku zevnitř pomocí tenkého předmětu (šroubovák, koktejlová tyčinka apod)

POZNÁMKA: orientace baterie +stranou dolů.

Vložte novou baterii ve stejné orientaci. Nyní stiskněte HELP tlačítko déle než 5 sekund (dokud červené světlo nezhasne). Tímto znovu aktivujete snímač.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte dodavatele, společnost APOS BRNO s.r.o., tel. 541 217 516.

